
LV

Papildus informācija par DC Bead[®] piesūcināšanu ar Irinotecan

APRAKSTS:

Piesūcinot ar irinotecan, DC Bead izmēri nedaudz samazinās, līdz pat 30%, ja tās piesūcina koncentrācijā 50 mg/ml.

INDIKĀCIJAS:

DC Bead paredzētas piesūcināšanai ar irinotecan šādā nolūkā:

- To asinsvadu embolizācija, kas apgādā ļaundabīgu kolorektālo vēzi, kas izveidojis metastāzes aknās (JKRV).
- Lokālas, kontrolētas un ilgstošas irinotecan devas piegāde JKRV.

KONTRINDIKĀCIJAS – IRINOTECAN:

Skatīt irinotecan iepakojumā ievietoto aprakstu par lietošanas kontrindikācijām.

UZMANĪBU:

Piesūcinātām mikrolodītēm saskaroties ar kontrastvielu / ūdens maisījumu daļa irinotecan tiek izskalota.

Ievadot bolus devas veidā var tikt piegādāts starp 10–20 mg irinotecan.

Ja tiek pārsniegta piesūcināšanas deva 50 mg irinotecan uz 1 ml DC Bead, tas var izraisīt sistēmisku irinotecan izplatīšanos un attiecīgās blakusparādības.

Nelietot irinotecan piesūcinātas mikrolodītes ar kontrastvielām, kas satur sāļus (piemēram, kalcija hlorīds)

NORĀDĪJUMI PAR PIESŪCINĀŠANU AR MEDIKAMENTU:

DC Bead ir piemērotas TIKAI piesūcināšanai ar irinotecan šķīdumu (20 mg/ml).

Lai iegūtu galīgo piesūcinājumu 100 mg irinotecan uz 2 ml DC Bead flakona, jāīrkojas šādi:

- i. Izmantojot šļirci ar tievu adatu, no DC Bead flakona izsūkt pēc iespējas vairāk fizioloģiskā šķīduma.
- ii. Izmantojot šļirci ar tievu adatu iepildīt 5 ml irinotecan šķīduma tieši DC Bead flakonā.
- iii. Viegli sakratīt DC Bead / irinotecan šķīdumu, lai sekmētu sajaukšanos, pēc tam nostādināt.

Piesūcināšanai progresējot mikrolodītes iekrāsosies tirkīzzilas.

iv. Piesūcināšana ilgst vismaz 2 stundas visu izmēru DC Bead.

v. Pirms lietošanas ar irinotecan piesūcinātās DC Bead iesūkt šļircē un pievienot tādu pašu tilpumu nejoniskas kontrastvielas. Uzmanīgi apgriezt šļirci, lai iegūtu vienmērīgu DC Bead suspensiju.

vi. Piesūcināšanas deva var būt līdz 50 mg irinotecan uz 1 ml DC Bead.

vii. Maksimālā ieteicamā kopējā irinotecan deva vienā procedūrā ir 200 mg.

AR MEDIKAMENTU PIESŪCINĀTU DC BEAD GLABĀŠANA:

Ar irinotecan piesūcinātās DC Bead var tikt uzglabātas līdz pat 24 stundām ledusskapī 2–8 °C temperatūrā vai 4 stundām istabas temperatūrā, nejoniska kontrastviela var būt un var nebūt pievienota.

NORĀDĪJUMI PAR TRANSPORTĒŠANU:

Izmest neizmantotās ar irinotecan piesūcinātās DC Bead.