
EE

Lisateave DC Bead[®] täitmise kohta Irinotekaaniga

KIRJELDUS:

DC Bead täitmisel 50 mg/ml irinotekaaniga väheneb kuulikeste suurus kuni 30%.

NÄIDUSTUSED:

DC Bead täidetakse irinotekaaniga järgmistel põhjustel:

- juba maksa kandunud pahaloomulist kolorektaalset vähki (mCRC) varustavate veresoonte embolisatsioon;
- lokaalse, kontrollitud ja pideva irinotekaaniannuuse viimine vähini (mCRC-ni).

VASTUNÄIDUSTUSED – IRINOTEKAAN:

Irinotekaani kasutamisel tekkivate vastunäidustuste kohta lugege pakendi infolehest.

HOIATUSED:

Kui lisada täidetud kuulikesele kontrastaine/vee segu, siis osa irinotekaani lahustub. Annuse kohaletoometamisel jääb lubatud irinotekaanikogus 10...20 mg vahele.

1 ml DC Bead täitmisel rohkem kui 50 mg irinotekaaniga võib see viia irinotekaani süsteemse jaotumiseni ja sellega seotud kõrvaltoimeteni.

Ärge kasutage irinotekaaniga täidetud kuulikesi soola sisaldavate kontrastainetega (nt kaltsiumkloriid).

RAVIMI TÄITMISJUHISED:

DC Bead sobib täitmiseks AINULT irinotekaanilahusega (20 mg/ml) .

2 ml DC Bead pudelikese lõplikuks täitmiseks 100 mg irinotekaaniga:

- eemaldage väikese mõõtenõelaga DC Bead pudelikesest nii palju soolvett kui võimalik;
- lisage süstla ja nõelaga 5 ml irinotekaanilahust otse DC Bead pudelikesse;
- segage DC Bead / irinotekaanilahust õrnalt raputades ja laske segul seejärel seista. Kuulikeses paiknevad osakesed muutuvad täitumisel türkiisivärvi;
- DC Bead suurusest olenemata kulub täitmiseks aega vähemalt 2 tundi;
- enne kasutamist viige irinotekaaniga täidetud DC Bead süstlasse ja lisage võrdne kogus mitteioonset kontrastainet. Keerutage ühtlase DC Bead lahuse saamiseks süstalt õrnalt;
- 1 ml DC Bead võib täita kuni 50 mg irinotekaaniannuusega;
- suurim soovitatav irinotekaaniannuus protseduuri kohta on 200 mg.

RAVIMIGA TÄIDETUD DC BEAD SÄILITAMINE:

Irinotekaaniga täidetud DC Bead võib hoida kuni 24 tundi külmkapis temperatuuril 2...8 °C või 4 tundi toatemperatuuril nii koos mitteioonse kontrastainega kui ka ilma.

KOHALETOIMETAMISE JUHISED:

Visake minema kõik kasutamata irinotekaaniga täidetud DC Bead.