
GR

**Επιπρόσθετες πληροφορίες για φόρτωση των
DC Bead[®] με Ιρινοτεκάνη**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατά τη φόρτωση με ιρινοτεκάνη, τα DC Bead υφίστανται μια ελαφρά μείωση του μεγέθους τους έως 30%, όταν η φόρτωση γίνεται σε συγκέντρωση 50 mg/ml.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Τα DC Bead προορίζονται για φόρτωση με ιρινοτεκάνη με σκοπό τα εξής:

- Εμβολισμό αγγείων που τροφοδοτούν κακοήγη καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού ο οποίος έχει κάνει μετάσταση στο ήπαρ (mCRC).
- Χορήγηση τοπικής, ελεγχόμενης δόσης ιρινοτεκάνης βραδείας αποδέσμευσης στον(ους) όγκο(ους) mCRC.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ:

Δείτε το ένθετο στη συσκευασία της ιρινοτεκάνης για αντενδείξεις σχετικά με τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Κατά την προσθήκη του μίγματος σκιαγραφικού /νερού στα φορτωμένα DC Bead, μέρος της ιρινοτεκάνης θα αποδεσμευτεί. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί επιπλέον μπόλους μεταξύ 10-20mg ιρινοτεκάνης κατά τη χορήγηση.

Η υπέρβαση της δόσης φόρτωσης των 50 mg ιρινοτεκάνης ανά 1 ml DC Bead ενδέχεται να οδηγήσει σε κάποια συστηματική κατανομή της ιρινοτεκάνης και σε σχετικές παρενέργειες.

Τα φορτωμένα με ιρινοτεκάνη DC Bead δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με σκιαγραφικό μέσο που περιέχει άλατα (π.χ. χλωριούχο ασβέστιο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ:

Τα DC Bead είναι κατάλληλα για φόρτωση διαλύματος ιρινοτεκάνης (20mg/ml) ΜΟΝΟ.

Για να λάβετε μια τελική φόρτωση 100 mg ιρινοτεκάνης ανά φιαλίδιο DC Bead των 2 ml:

- i. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο φυσιολογικό ορό από ένα φιαλίδιο DC Bead με χρήση σύριγγας με βελόνα μικρού διαμετρήματος.
- ii. Με χρήση σύριγγας και βελόνας προσθέστε τα 5 ml του διαλύματος ιρινοτεκάνης απευθείας στο φιαλίδιο των DC Bead.
- iii. Αναδεύσατε απαλά το φιαλίδιο που περιέχει τα DC Bead και το διάλυμα ιρινοτεκάνης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάμειξη και κατόπιν αφήστε να σταθεί ακίνητο. Τα DC Bead θα γίνουν πικρούζ χρώμα καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της φόρτωσης.
- iv. Η φόρτωση θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 ώρες για όλα τα μεγέθη των DC Bead.
- v. Πριν από τη χρήση, μεταφέρετε σε μια σύριγγα τα DC Bead στα οποία έχει φορτωθεί η ιρινοτεκάνη και προσθέστε ίσο όγκο μη ιοντικού σκιαγραφικού μέσου. Αναστρέψτε απαλά τη σύριγγα, έτσι ώστε να λάβετε ένα ομοιόμορφο εναιώρημα των DC Bead.
- vi. Είναι δυνατό να φορτωθεί μια δόση ιρινοτεκάνης έως 50 mg ανά ml των DC Bead.
- vii. Η μέγιστη συνιστώμενη συνολική δόση ιρινοτεκάνης ανά διαδικασία είναι 200 mg.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ DC BEAD:

Τα φορτωμένα με ιρινοτεκάνη DC Bead είναι δυνατό να φυλαχθούν έως 24 ώρες σε ψυγείο στους 2-8 °C ή 4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου παρουσία ή απουσία μη ιοντικού σκιαγραφικού μέσου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιημένα DC Bead που έχουν φορτωθεί με ιρινοτεκάνη.