
HU

Kiegészítő információk a DC Bead[®] Irinotecan betöltéséhez

LEÍRÁS:

Irinotecannal való feltöltéskor a DC Bead mérete kissé csökken. 50 mg/ml betöltése esetén maximum 30%-os a csökkenés tapasztalható.

JAVALLATOK:

A DC Bead gömböket irinotecannal való feltöltésre szánták a következő célokra:

- Rosszindulatú, májáttétes kolorektális (mCRC) daganatot ellátó erek embolizációjához.
- Egy helyi, ellenőrzött, fenntartott adag irinotecan mCRC-be történő bejuttatásához.

ELLENJAVALLATOK – IRINOTECAN:

A használatra vonatkozó ellenjavallatokat olvassa el az irinotecan csomagolásán.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Amikor a feltöltött gömbökhöz kontrasztanyagot vagy vizes keveréket ad, az irinotecan egy része kioldódik. Egyszerre 10-20 mg súlyú irinotecan adag adható be.

Az 1 ml űrtartalmú DC Bead gömbökbe gömböknként legfeljebb 50 mg irinotecan tölthető, az ezt meghaladó mennyiség az irinotecan szisztémás eloszlásához és ehhez kapcsolódóan mellékhatásokhoz vezethet.

Irinotecannal töltött gömbökhöz ne használjon sótartalmú kontrasztanyagot (például kalcium-kloridot).

GYÓGYSZERBETÖLTÉSI ÚTMUTATÓ:

A DC Bead gömbökbe CSAK irinotecan oldat (20 mg/ml) tölthető.

A 2 ml űrtartalmú DC Bead üvegcsébe 100 mg irinotecan betöltéséhez tegye az alábbiakat:

- i. Távolítsa el minél több sóoldatot a DC Bead üvegcséből kis tűátmérőjű fecskendő segítségével.
- ii. A fecskendőt és a tűt használva fecskendezze be az 5 ml irinotecan oldatot közvetlenül a DC Bead üvegcsébe.
- iii. Óvatosan rázza fel a DC Bead–irinotecan oldatot a keveredés elősegítése érdekében, majd hagyja állni. A gömbök a töltés során türkizkék színűre váltanak.
- iv. A betöltődés legalább 2 órát vesz igénybe minden DC Bead méret esetében.
- v. Felhasználás előtt szívja át az irinotecannal betöltött DC Bead tartalmát egy fecskendőbe, majd adjon hozzá azonos mennyiségű nem ionos kontrasztanyagot. Óvatosan fordítsa meg a fecskendőt, hogy a DC Bead egyenletesen elkeveredjen.
- vi. A betölthető adag legfeljebb 50 mg irinotecan lehet 1 milliliternyi DC Bead gömbbe.
- vii. Az ajánlott teljes adag irinotecan eljárásonként legfeljebb 200 mg lehet.

A GYÓGYSZERREL TÖLTÖTT DC BEAD TÁROLÁSA:

Az irinotecannal töltött DC Bead gömbök nem ionos kontrasztanyag jelenlétében vagy hiányában hűtőszekrényben 2–8 °C-on maximum 24 órán át, szobahőmérsékleten 4 órát tárolhatók.

BEVITELI UTASÍTÁSOK:

Az irinotecannal töltött, fel nem használt DC Bead gömböket dobja ki.