
LT

**Papildoma informacija apie „DC Bead[®]“ mikrosferų
įsotinimą „Irinotecan“ preparatu**

APRAŠYMAS:

Atliekant įsotinimą „Irinotecan“ preparatu, „DC Bead“ mikrosferų dydis šiek tiek sumažėja – iki 30 %, kai įsotinama 50 mg/ml.

INDIKACIJOS:

„DC Bead“ mikrosferos įsotinamos „Irinotecan“ preparatu šiais atvejais:

- embolizuojant kraujagysles, per kurias į kepenis patenka piktybinio kolorektalinio vėžio metastazės (mCRC);
- švirksčiant į mCRC vietinę, kontroliuojamą ilgalaikę „Irinotecan“ preparato dozę.

KONTRAINDIKACIJOS – „IRINOTECAN“:

Informacijos apie su preparato vartojimu susijusias kontraindikacijas ieškokite ant „Irinotecan“ pakuotės.

ĮSPĖJIMAI:

Ant įsotintų rutuliukų užpylus kontrastinės medžiagos/vandens mišinio, išsiskiria šiek tiek irinotekano. Švirksčiant gali būti suleidžiamas 10–20 mg „Irinotecan“ preparato boliusas.

Viršijus 50 mg „Irinotecan“ įsotinimo dozę vienam mililitrui „DC Bead“ mikrosferų, gali atsirasti tam tikrų sisteminio irinotekano pasiskirstymo požymių ir pasireikšti su tuo susijęs šalutinis poveikis.

„Irinotecan“ preparatu įsotintų rutuliukų nenaudokite su druskų turinčiomis kontrastinėmis medžiagomis (pvz., kalcio chloridu).

VAISTO ĮSOTINIMO INSTRUKCIJOS:

„DC Bead“ mikrosferos gali būti įsotintos TIK „Irinotecan Solution“ tirpalu (20 mg/ml).

Vienas 2 ml „DC Bead“ buteliuko turinys 100 mg „Irinotecan“ preparatu, įsotinamas toliau nurodyta tvarka:

- i) Švirksčiu su mažo skersmens adata iš „DC Bead“ buteliuko pašalinkite kuo daugiau fiziologinio tirpalo.
- ii) Švirksčiu ir adata tiesiai į „DC Bead“ buteliuką įšvirkskite 5 ml „Irinotecan“ tirpalo.
- iii) Švelniai pamaišykite „DC Bead“ ir „Irinotecan“ tirpalą, kad jis greičiau išsimaišytų. Tada palikite nusistovėti. Vykstant įsotinimo procesui, rutuliukai tampa žalsvai melsvi.
- iv) Visų dydžių „DC Bead“ mikrosferų įsotinimas vyksta ne trumpiau nei 2 val.
- v) Prieš naudodami, irinotekanu įsotintas „DC Bead“ mikrosferas įtraukite į švirksčią papildomai įtraukite tokį pat kiekį nejoninės kontrastinės medžiagos. Atsargiai apverskite švirksčią, kad „DC Bead“ mikrosferos tolygiai išsimaišytų.
- vi) Vieną „DC Bead“ mikrosferų mililitrą galima įsotinti 50 mg „Irinotecan“ preparato doze.
- vii) Vienai procedūrai rekomenduojama didžiausia bendra „Irinotecan“ preparato dozė yra 200 mg.

PREPARATU ĮSOTINTŲ „DC BEAD“ MIKROSFERŲ LAIKYMAS:

„Irinotecan“ preparatu įsotintos „DC Bead“ mikrosferos gali būti laikomos iki 24 val. šaldytuve, 2–8 °C temperatūroje, arba 4 val. kambario temperatūroje, nepriklausomai nuo to, ar yra įmaišyta nejoninė kontrastinė medžiaga.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Utilizuokite visas nepanaudotas „Irinotecan“ preparatu įsotintas „DC Bead“ mikrosferas.