

---

PT

---

**Informação adicional para carregamento de DC Bead<sup>®</sup> com Irinotecan**

**DESCRIÇÃO:**

Após o carregamento com irinotecan, as DC Bead sofrem uma ligeira diminuição de tamanho, até 30% ao carregar 50 mg/ml.

**INDICAÇÕES:**

As DC Bead foram concebidas para serem carregadas com irinotecan com o propósito de:

- Embolização dos vasos sanguíneos que alimentam o tumor colorretal maligno com metástases no fígado (mCRC)
- Administração de uma dose local, controlada e sustentada de irinotecan no mCRC.

**CONTRA-INDICAÇÕES – IRINOTECAN:**

Consultar as contra-indicações relativas à sua utilização do irinotecan no folheto informativo do fármaco.

**PRECAUÇÕES:**

Para além da solução de contraste/mistura com água no carregamento das DC Bead, algum irinotecan poderá ser diluído. Poderão ser administrados 10 a 20 mg de irinotecan, em caso de administração de um bólus.

Uma dose de carregamento superior a 50 mg de irinotecan por 1 ml de DC Bead pode provocar alguma distribuição sistémica de irinotecan e consequentes efeitos secundários.

Não utilizar irinotecan carregado com DC Bead juntamente com agentes de contraste contendo sais (por ex., Cloreto de cálcio).

**INSTRUÇÕES PARA CARREGAR O FÁRMACO:**

As DC Bead são recomendadas APENAS para o carregamento da solução irinotecan (20 mg/ml).

Para obter um carregamento final de 100 mg de irinotecan por frasco de 2 ml de DC Bead:

- i. Remover o máximo possível de solução salina do frasco de DC Bead utilizando uma seringa com uma agulha de valor gauge baixo (diâmetro pequeno).
- ii. Utilizando uma seringa e agulha, adicionar 5 ml de solução de irinotecan directamente no frasco de DC Bead.
- iii. Agitar suavemente a solução de DC Bead/irinotecan para estimular a mistura e deixar repousar.

As DC Bead adquirem uma cor turquesa durante o processo de carregamento.

iv. O carregamento terá a duração mínima de duas horas independentemente do tamanho das DC Bead.

v. Antes de utilizar, transferir as DC Bead carregadas com irinotecan para uma seringa e adicionar igual volume de um produto de contraste não-iónico. Inverter cuidadosamente a seringa para obter uma distribuição uniforme das DC Bead.

vi. Pode ser carregada uma dose até 50 mg de irinotecan por 1 ml de DC Bead.

vii. A dose total máxima recomendada de irinotecan por procedimento é de 200 mg.

**ARMAZENAMENTO DAS DC BEAD CARREGADAS COM O FÁRMACO:**

As DC Bead carregadas com irinotecan podem ser armazenadas até 24 horas num frigorífico a 2-8 °C ou 4 horas à temperatura ambiente com ou sem um produto de contraste não-iónico.

**INSTRUÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO:**

Deitar fora quaisquer DC Bead carregadas com irinotecan que não tenham sido utilizadas.