

TR

DC Bead® Irinotecan Yüklemesi için Ek Bilgi

TANIM:

Irinotecan yüklemesi ardından DC Bead boyutlarında, 50 mg/ml oranında yükleme sırasında %30'a varan küçük bir azalma gerçekleşir.

ENDİKASYONLAR:

DC Bead aşağıda belirtilen amaçlarla, irinotecan ile yüklenmek üzere tasarlanmıştır:

- Karaciğerde metastaz yapmış kötü huylu kolorektal kanserini (mCRC) besleyen damarların embolizasyonu.
- Metastaz yapmış kolorektal kanserine (mCRC) lokal, kontrollü ve sürekli dozda irinotecan verilmesi.

KONTRENDİKASYONLAR – İRINOTEKAN:

Kullanımıyla ilgili kontrendikasyonlar için irinotecan ambalajındaki eke bakın.

DİKKAT:

İlaç yüklü taneciklere (beads) kontrast madde/su karışımının eklenmesiyle bir miktar irinotecan ayrışacaktır. İlacın verilmesiyle 10-20 mg arasında irinotecan bolusu verilebilir.

1 ml DC Bead için 50 mg'lık irinotecan yükleme dozunun aşılması, bir miktar irinotecanın sistemik dağılımına ve buna bağlı yan etkilere neden olabilir.

İrinotecan yüklü tanecikleri (beads) tuz içeren (örn. Kalsiyum klorür) kontrast maddeleriyle birlikte kullanmayın.

İLAÇ YÜKLEME TALİMATLARI:

DC Bead SADECE irinotecan Solüsyonu (20 mg/ml) yüklemesi için uygundur.

2 ml'lik DC Bead flakonunda 100 mg irinotecan yüklemesi elde etmek için:

- İnce iğneli bir şırınga kullanarak DC Bead içeren flakondaki serum fizyolojinin olabildiğince fazlasını uzaklaştırın.
- Bir şırınga ve iğne kullanarak 5 ml irinotecan solüsyonunu doğrudan DC Bead flakonuna ilave edin.
- Karışması için DC Bead/irinotecan solüsyonunu hafifçe çalkalayıp beklemeye bırakın. Yükleme ilerledikçe tanecikler (beads) turkuaz bir renk alacaktır.
- Tüm büyüklüklerdeki DC Bead için yükleme süresi en az 2 saat olacaktır.
- Kullanmadan önce irinotecan yüklü DC Bead'i şırıngaya aktarın ve eşit hacimde iyonik olmayan kontrast madde ilave edin. Eşit dağılmış bir DC Bead süspansiyonu elde etmek için şırıngayı yavaşça ters çevirin.
- Her 1 ml DC Bead için 50 mg'a kadar irinotecan dozu yüklenebilir.
- Tek bir prosedür için önerilen toplam irinotecan dozu 200 mg'dır.

İLAÇ YÜKLÜ DC BEAD'İN SAKLANMASI:

İrinotecan yüklü DC Bead, iyonik olmayan kontrast madde eklenmiş olsun veya olmasın, 2-8°C sıcaklıktaki buzdolabında 24 saate veya oda sıcaklığında 4 saate kadar saklanabilir.

İLACI VERME TALİMATLARI:

Kullanılmamış irinotecan yüklü tüm DC Bead'i atın.